

# seca analytics 115

Kurzanweisung  
zur Installation

Kurzanweisung { **seca analytics 115**



# Kurzanweisung zur Installation

## Einzelarbeitsplatz

### Hinweis:

Diese Kurzanweisung sowie den Download-Link zur aktuellen Version der PC-Software seca analytics 115 haben Sie auf elektronischem Weg erhalten. Ihrem seca mBCA liegt deshalb - anders als in dessen Gebrauchsanweisung aufgeführt - keine DVD-Version der PC-Software bei.

<b>1. Installation vorbereiten</b>	S. 2
<b>2. Software installieren</b>	S. 3
<b>3. Einzelplatzlizenz freischalten</b>	S. 6
<b>4. seca emr connector installieren</b>	S. 9
<b>5. Dialogsprache ändern</b>	S. 11
<b>6. Anwender-Dokumentationen aufrufen</b>	S. 13

### 1. Installation vorbereiten

1. Folgen Sie dem Download-Link in Ihrer E-Mail.
2. Laden Sie das Zip-Archiv herunter.
3. Entpacken Sie das Zip-Archiv.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte auf dem PC haben.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf den nächsten Seiten.


Die Anbindung Ihres seca mBCA an die PC-Software seca analytics 115 übernimmt - wie versprochen - unser seca Service für Sie. Noch keinen Termin vereinbart? Kontaktieren Sie uns unter [technicalservice.de@seca.com](mailto:technicalservice.de@seca.com).

## 2. Software installieren

### Schritt 1



Datei „seca.analytics.115.Installer.exe“ öffnen:

- Rechte Maustaste klicken
- Als Administrator ausführen

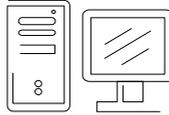


## Schritt 2

Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

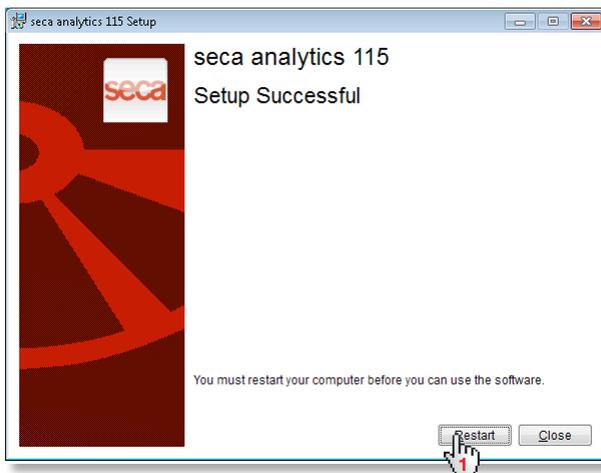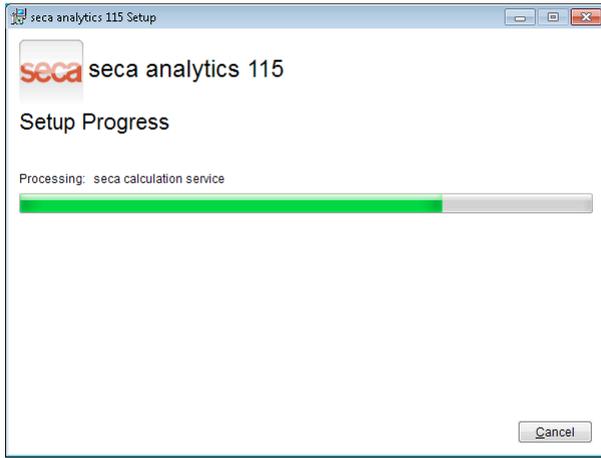


Erscheint nach System-Neustart automatisch:

Einzelarbeitsplatz:

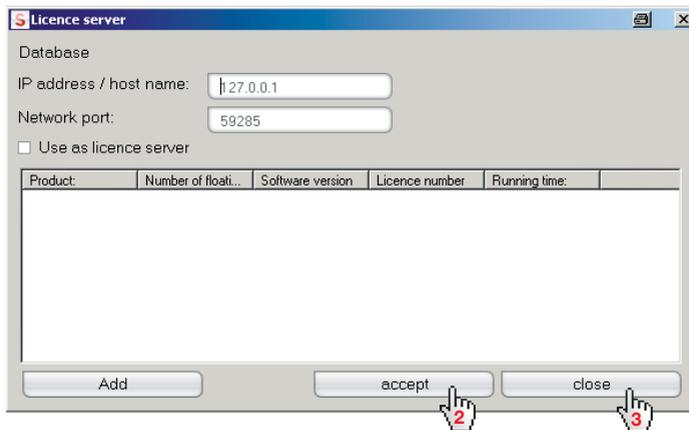


**seca 115** Netzwerk: IP-Adresse + Port des Servers im **seca 115** Netzwerk eingeben, siehe Administratorhandbuch

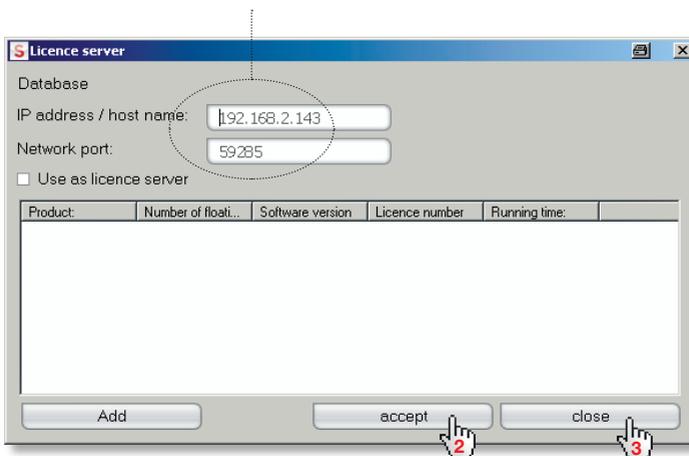

# 3. Einzelplatzlizenz freischalten


## Schritt 1

seca Software starten

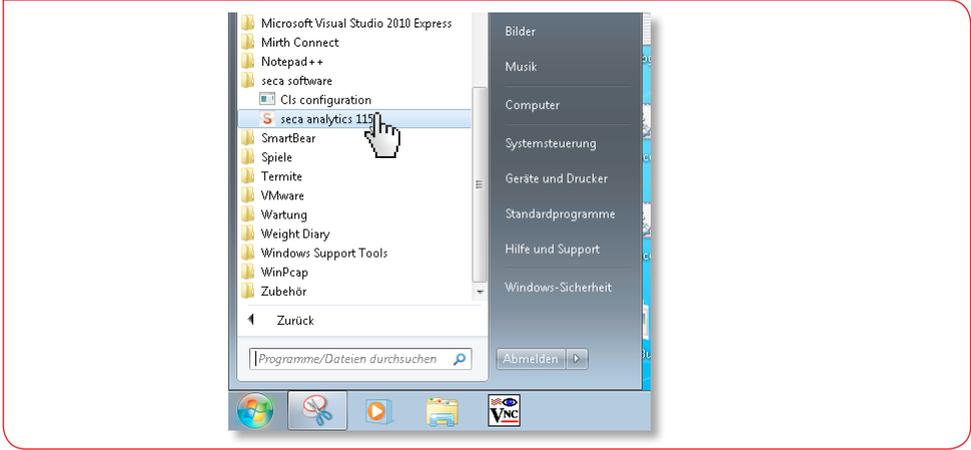

## Schritt 2

- a) Installationscode eingeben (in der E-Mail mit dem Download-Link enthalten)
- b) Registrierungscode generieren

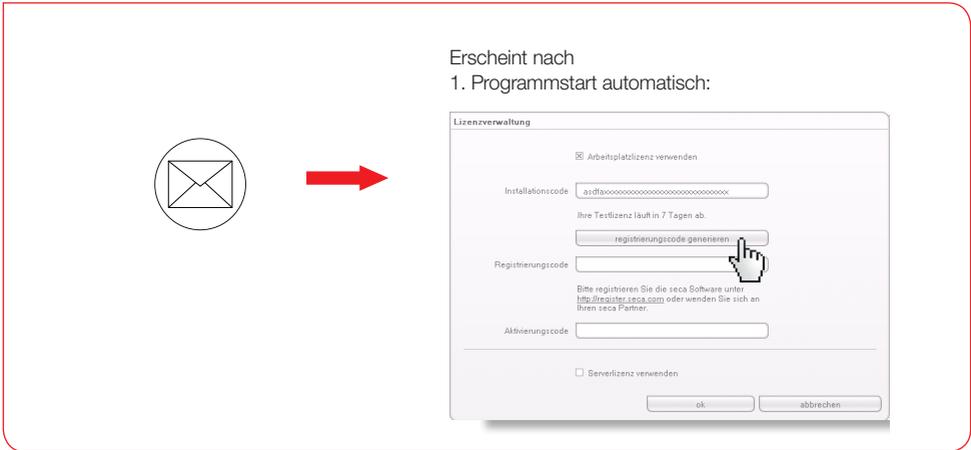

### Schritt 3

Generierten Registrierungscode auf der seca Internetseite eingeben, Aktivierungscode wird per E-Mail versendet.

Software registrieren unter: <http://register.seca.com>

Lizenzverwaltung

Arbeitsplatzlizenz verwenden

Installationscode


Ihre Testlizenz läuft in 7 Tagen ab.

Registrierungscode

Bitte registrieren Sie die seca Software unter <http://register.seca.com> oder wenden Sie sich an Ihren seca Partner

Aktivierungscode

Serverlizenz verwenden

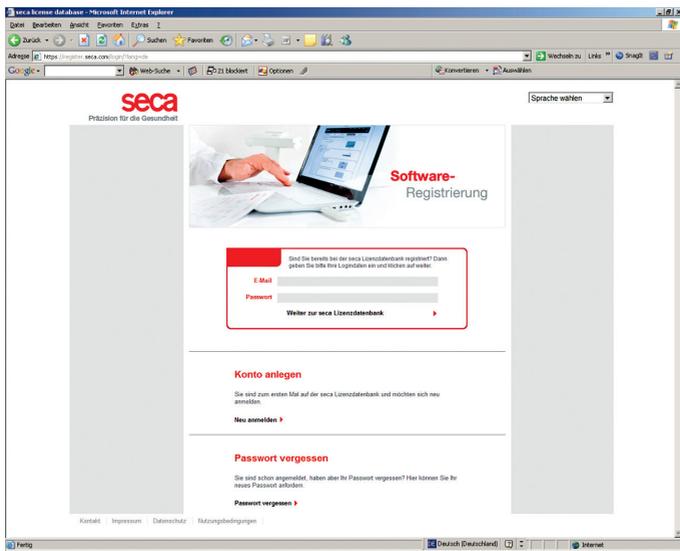

## Schritt 4

- a) Aktivierungscode aus E-Mail eingeben
- b) Lizenzierung beenden



**Lizenzverwaltung**

Arbeitsplatzlizenz verwenden

Installationscode: asdfaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ihre Testlizenz läuft in 7 Tagen ab.

registrierungscode generieren

Registrierungscode: VCD0BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bitte registrieren Sie die seca Software unter <http://register.seca.com> oder wenden Sie sich an Ihren seca Partner.

Aktivierungscode: X650DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Serverlizenz verwenden

ok      abbrechen

**Fertig!**






## 4. seca emr connector installieren

### Schritt 1



Datei „\\EmrConnector\\de-de\\setup.msi“ öffnen:

- Rechte Maustaste klicken
- Als Administrator ausführen

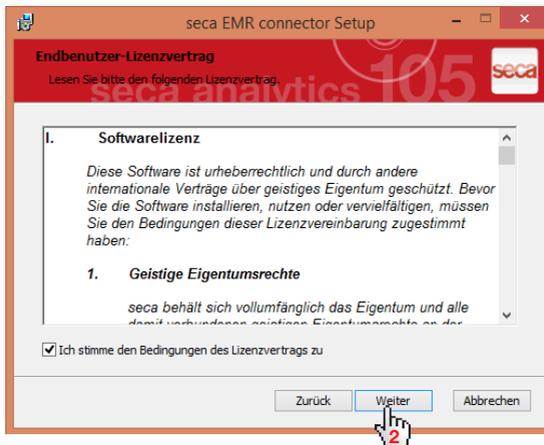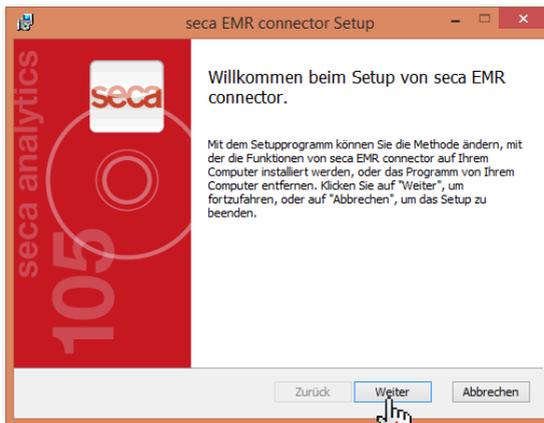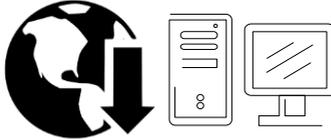

## Schritt 2



Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

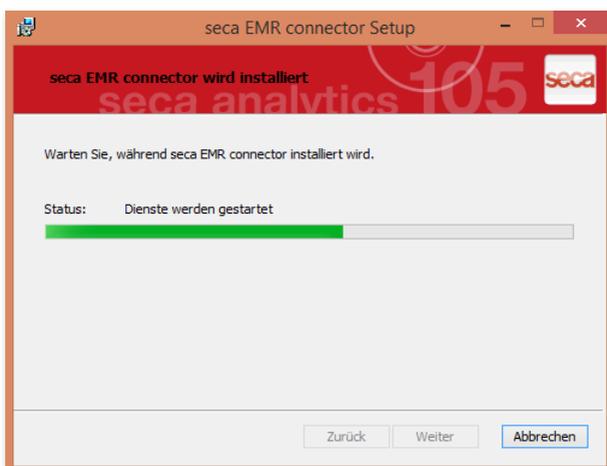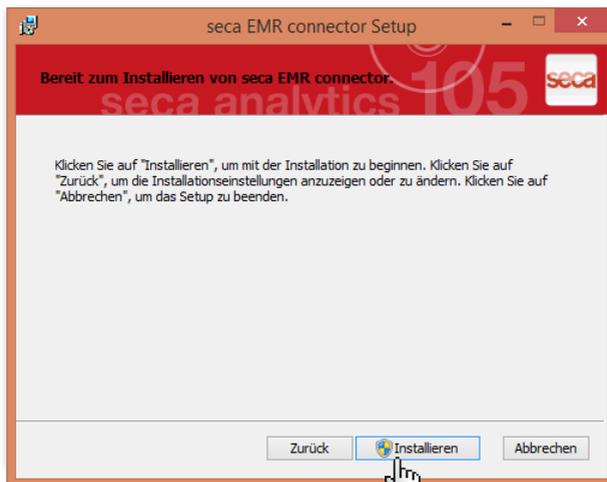

# 5. Dialogsprache ändern



## Schritt 1

seca Software starten

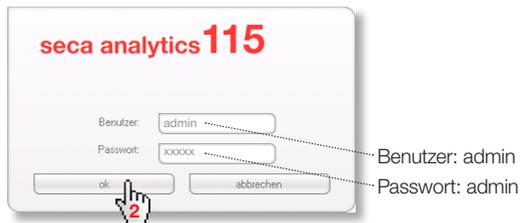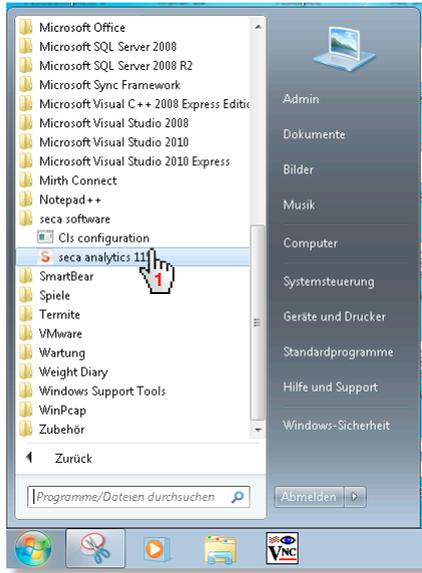


## Schritt 2

Dialogfenster „Einstellungen“ aufrufen

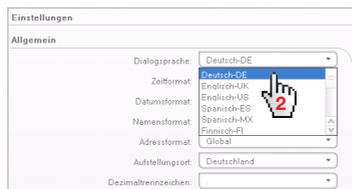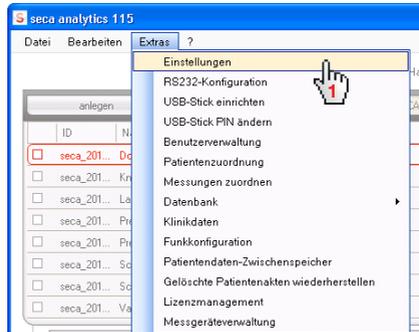


# Anwender-Dokumentationen aufrufen

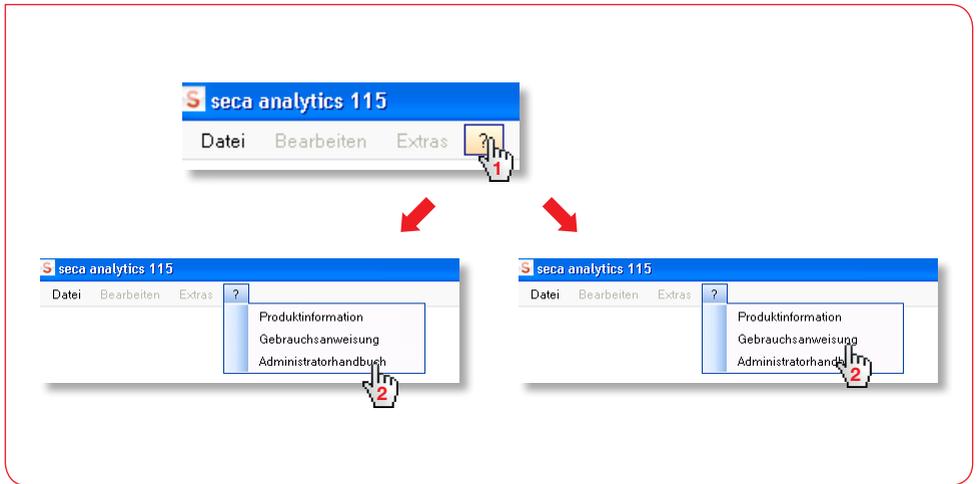

## seca analytics 115

### Administratorhandbuch

- Benutzer verwalten
- Funkgruppen aufbauen
- PC-Netzwerk aufbauen
- RS232-Geräte konfigurieren
- Drucker für mBCA auswählen
- ....

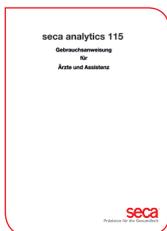

## seca analytics 115


### Gebrauchsanweisung

- seca Patientenakten verwalten
- Messungen durchführen
- Untersuchungsergebnisse auswerten
- Untersuchungsberichte ausdrucken
- seca Patientenakte an seca mBCA senden
- ....

# Medizinische Messsysteme und Waagen seit 1840

seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3–25  
22089 Hamburg · Deutschland  
Telefon +49 40 20 00 00 0  
Fax +49 40 20 00 00 50  
technicalservice.de@seca.com

Alle Kontaktdaten unter [www.seca.com](http://www.seca.com)

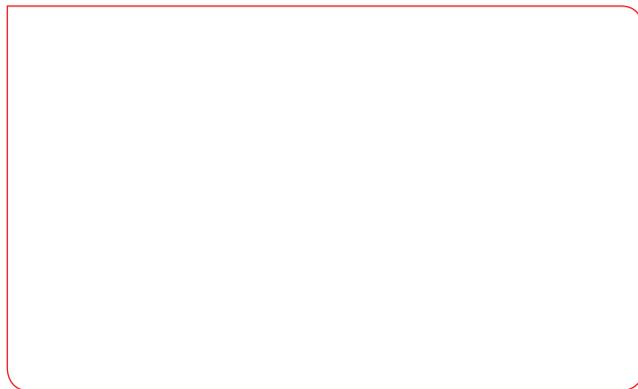

**seca operiert weltweit mit Hauptsitz in Deutschland**  
und Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, Nordamerika, Schweiz, China, Japan,  
Mexiko, Österreich, Polen, Mittlerer Osten, Brasilien, Finnland, Lateinamerika und Asien-Pazifik

**seca**<sup>®</sup>  
Präzision für die Gesundheit